

【搬送中の事故を防ぐため、必ず下記の手順でお送りください】

【ご用意いただくもの】

1. 採血済みの採血管(EDTA-2Naまたは2K)
 2. 吸水性のある紙(キムワイプ、キムタオル、ティッシュペーパーなど)
 3. ガムテープ
 4. ジッパー付きバッグ
 5. 緩衝材
 6. 搬送用発泡スチロール
 7. 検査依頼書をA4普通用紙に印刷
- 必要に応じ、再栓キャップとパラフィルム



【採血管の準備】

1. 搬送中に血液がこぼれる危険がありますので、原則的にフタをはがさずに採血してください
2. フタをはがして採血した場合、**再栓キャップをした上からパラフィルム**でしっかり巻いてください



【梱包手順】

1. 匿名化検体番号を採血管に油性ペンで記載してください
 2. 採血管を吸水性のある紙でつつみ、セロハンテープなどでとめ、ジッパー付きのビニールバッグに入れてください
- * 複数検体があるときは、検体番号ごとにビニールバッグに入れてください
3. 「印刷済の検査依頼書」と「検体」を搬送用ボックスに入れ、緩衝材をつめてください
 4. プラスカーゴ社をご利用の場合は、4. までの手順を整えたうえで集荷をご手配ください
(pcs-kentai@plus-cs.co.jp、eisei@ncchd.go.jpまで検体搬送依頼書を送り、集荷日を確定)

